



Az egyes antitesteket tartalmazó reagens előre szárított formában van jelen


Serafol® ABO+D

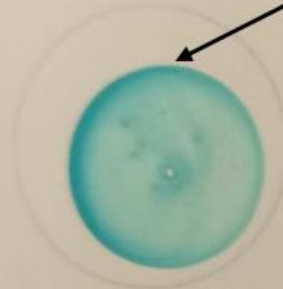

Anti-A

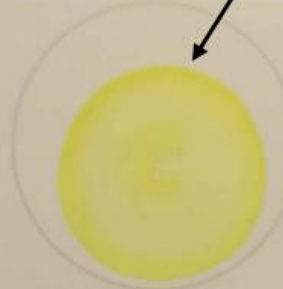

Anti-B

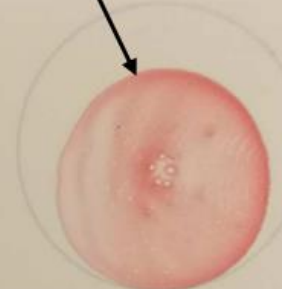

Anti-D



2018-10



0180117



Blut / Blood / Sang

Name / Nom

ID

Geb.-Dat. / Date of Birth
Date de Naissance

Kons.-Nr. / Unit No.
No. Poche

Datum / Date

Blutgruppe / Blood Group
Groupe Sanguin

Unterschrift / Signature

sifin

BIO-RAD

Autokontroll mező

A **Serafol** kártya mindegyik mezőjére 1 csepp fiziológias sóoldatot cseppentünk.

4 csepp, ujjbegyből vett vért cseppentünk: az anti-A, az anti-B, az anti-D antitestek foltjára és a kontroll helyére.

A cseppeket nem éles eszközzel összekeverjük, ügyelve, hogy ne vigyünk át reagenst.

60 másodperc elteltével leolvasható a kártyán megjelenő vércsoport. Száradás után lefóliázható és hazavihető.

Csak akkor értékelhetők a reakciók, ha a kontroll negatív (ott nincs kicsapódás)!